

Узкий временный абатмент Slim Temporary Abutment

Инструкция по применению



Важно! Внимательно ознакомьтесь со следующей информацией.

Отказ от ответственности.

Данный продукт является частью общей концепции и может применяться только с соответствующими оригинальными компонентами согласно инструкциям и рекомендациям Nobel Biocare. Нерекондуемое применение продукции сторонних производителей в сочетании с компонентами Nobel Biocare приводит к аннулированию гарантии и других обязательств, явных или подразумеваемых, выполняемых компанией Nobel Biocare. Специалист, использующий продукцию Nobel Biocare, несет ответственность за определение ее пригодности для конкретного пациента и в конкретной клинической ситуации. Компания Nobel Biocare отказывается от любых обязательств, явных или подразумеваемых, и не несет ответственность за любой прямой или косвенный ущерб, ущерб, связанный с возмещением убытков, или другие виды ущерба, возникающие вследствие любых ошибок при принятии профессиональных решений или в профессиональной практике при использовании продукции Nobel Biocare. Пользователь также несет ответственность за регулярное изучение последних разработок и изменений, касающихся продукции Nobel Biocare и ее применения. В случае сомнений пользователю необходимо обратиться в компанию Nobel Biocare. Поскольку применение данного продукта находится под контролем пользователя, он несет ответственность за выполнение данных действий. Компания Nobel Biocare не берет на себя ответственность за возникающий вследствие этого ущерб. Обратите внимание на то, что некоторая продукция, указанная в данных инструкциях по применению, может быть разрешена к применению, представлена или лицензирована для продажи не во всех странах.

Описание.

Узкий временный абатмент Slim Temporary Abutment представляет собой абатмент для имплантата, устанавливаемый непосредственно на внутрикостные дентальные имплантаты NobelActive® CC, NobelReplace® CC и NobelParallel™ CC и предназначенный для использования в качестве временного средства при ортопедической реабилитации пациентов на протяжении не более 365 дней.

Назначение.

Абатменты для имплантатов применяются в качестве опоры ортопедических конструкций на верхней или нижней челюсти для восстановления жевательной функции.

Абатменты в комбинации с внутрикостными имплантатами используются в качестве основания и опоры для различных ортопедических конструкций на верхней или нижней челюсти. Они предназначены для одиночных временных реставраций под коронки с цементной фиксации.

Показания к применению.

Узкий временный абатмент Slim Temporary Abutment представляет собой стандартный ортопедический компонент, устанавливаемый непосредственно на внутрикостный дентальный имплантат и предназначенный для использования в качестве средства ортопедической реабилитации во фронтальном отделе и области премоляров.

Противопоказания.

Установка узких временных абатментов Slim Temporary Abutments противопоказана в следующих случаях:

- наличие медицинских противопоказаний к выполнению хирургических стоматологических вмешательств;
- отсутствие возможности установить имплантаты такого размера, в таком количестве или в те позиции, которые необходимы для безопасного осуществления функциональной или парафункциональной нагрузки;
- аллергическая реакция или гиперчувствительность к титановому сплаву Ti-6Al-4V (титан, алюминий, ванадий).

Узкие временные абатменты Slim Temporary Abutments противопоказаны к применению в качестве опоры для временных коронок в области моляров.

Меры предосторожности.

Дефицит твердых или мягких тканей на момент имплантации может препятствовать достижению оптимального эстетического результата или привести к нежелательному углу наклона имплантата.

Чтобы обеспечить долгосрочный результат, рекомендуется проводить регулярные комплексные осмотры пациента после имплантологического лечения и информировать его о правильной гигиене полости рта.

Все хирургические инструменты и приспособления следует содержать в надлежащем состоянии и избегать повреждения имплантатов или других компонентов.

Особое внимание следует обратить на наличие местных или системных факторов, которые могут повлиять на процесс заживления костной или мягких тканей или на процесс остеоинтеграции (в том числе курение, неудовлетворительная гигиена полости рта, неконтролируемый диабет, лучевая терапия в челюстно-лицевой области, стероидная терапия, наличие очагов инфекции в окружающей кости).

С особой осторожностью следует проводить лечение пациентов, принимающих бисфосфонаты.

В целом установка имплантата и изготовление ортопедической конструкции должны осуществляться в соответствии с конкретной клинической ситуацией. Наличие бруксизма или неблагоприятное соотношение челюстей может стать основанием для пересмотра плана лечения.

Не превышайте усилие затяжки фиксирующего винта **15 Н/см**. Чрезмерное усилие фиксации абатмента может привести к перелому винта.

Поскольку компоненты имеют небольшой размер, следует проявлять осторожность во избежание их проглатывания или вдыхания пациентом.

Докторам, как начинающим работая с имплантатами, так и более опытным, настоятельно рекомендуется пройти специальное обучение, прежде чем начинать лечение с использованием новых методов.

Nobel Biocare предлагает широкий выбор обучающих курсов для специалистов с различным уровнем знаний и опыта. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.nobelbiocare.com.

Во избежание возможных осложнений рекомендуется, чтобы при первой операции присутствовал специалист, имеющий опыт применения нового устройства/метода лечения. Для этой цели компания Nobel Biocare располагает опытными специалистами, которые могут выступать в роли наставников по всему миру.

Тесное взаимодействие хирурга, ортопеда и зубного техника крайне важно для успешного имплантологического лечения.

Инструкция по применению.

Подготовка абатментов должно сопровождаться обильным охлаждением.

Рекомендуется проводить препарирование абатментов вне полости рта. Используйте карборундовый диск и твердосплавный бор.

Клинический этап.

1. Установите соответствующий абатмент и проверьте высоту по окклюзии.

Примечание. Узкие временные абатменты Slim Temporary Abutments могут подвергаться воздействию только ограниченных окклюзионных нагрузок, временная коронка должна быть выведена из окклюзии.

2. Затяните абатмент с усилием **15 Н/см** с помощью отвертки Unigrip™ Screwdriver и ручного ортопедического динамометрического ключа Manual Torque Wrench Prosthetic.

Внимание! Не превышайте усилие затяжки фиксирующего винта **15 Н/см**. Чрезмерное усилие фиксации абатмента может привести к перелому винта.

3. Изготовьте временную коронку прямым способом.
4. Произведите цементную фиксацию временной коронки (при необходимости можно шинировать ее с соседними зубами).
5. Удалите излишки цемента.

Дополнительную информацию о клинических и лабораторных этапах см. в клинических руководствах, доступных на сайте www.nobelbiocare.com, или запросите последнюю печатную версию у представителя компании Nobel Biocare.

Материалы.

Узкие временные абатменты Slim Temporary Abutments: титановый сплав (90% титана, 6% алюминия, 4% ванадия).

Инструкции по очистке и стерилизации.

Узкие временные абатменты Slim Temporary Abutments поставляются стерильными и предназначены для однократного использования только до указанного срока годности.

Предупреждение! Не используйте компонент, если упаковка повреждена или открывалась ранее.

Внимание! Продукт предназначен для однократного использования и не подлежит повторной обработке. Повторная обработка может привести к потере его механических, химических и/или биологических свойств. Повторное использование может привести к перекрестному заражению.

Информация о безопасности МРТ.

Пожалуйста, обратите внимание, что оценка безопасности и совместимости компонента в условиях МРТ не проводилась. Продукт также не проходил испытания на нагревание или миграцию в условиях МРТ.

Дополнительную информацию о магнитно-резонансной томографии можно найти в «Инструкции по очистке и стерилизации продукции Nobel Biocare с информацией о МРТ» на веб-сайте www.nobelbiocare.com/sterilization или запросите последнюю печатную версию у представителя компании Nobel Biocare.

Условия хранения и использования компонентов.

Компонент следует хранить в оригинальной упаковке при комнатной температуре в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Неправильное хранение может повлиять на свойства компонента, что может привести к его повреждению.

Утилизация.

Утилизация компонента должна выполняться в соответствии с местными правилами и требованиями по защите окружающей среды с учетом класса опасности отходов.

Производитель: Nobel Biocare AB, Box 5190, 402 26
Västra Hamngatan 1, 411 17 Göteborg, Sweden (Швеция).
Телефон: +46 31 81 88 00. Факс: +46 31 16 31 52. www.nobelbiocare.com

CE 0086



Стерилизовано
гамма-излучением



Не подлежит повторной
стерилизации



См. инструкцию по
применению



Срок
годности



Для одноразового
использования



Номер партии



Не использовать,
если упаковка
повреждена

RU Все права защищены.

Nobel Biocare, логотип Nobel Biocare и другие товарные знаки, используемые в данном документе, являются товарными знаками группы компаний Nobel Biocare, если не указано иное или не является очевидным из контекста в конкретном случае. Изображения продукции приведены без учета масштаба.